

1121 Bråckbandage

Funktion	Stödjande maggördel som hjälper till att hålla tillbaka bråck.
Indikation	Buk- och ärrbråck.
Material	Polyamid, gummi, spiralfjädrar.
Applicering	1) Reponera bråcket, underlättas om du ligger ned. 2) Placera bandaget över magen, med skenan mitt på. 3) Tag änden, med mjuk kardborre, i underkant med vänster hand. 4) Dra i bandaget med höger hand och utnyttja dess elasticitet. Fäst hårda kardborren uppå den mjuka, på vänster höft.

Viktiga

anvisningar	1) Om du är osäker över applicering, kontakta ordinator/ inköpsställe. 2) Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur överstigande 120°C/248°F. 3) Mindre justering av produkten får endast göras av ordinator/ inköpsställe eller auktoriserad person*. Ordinatörens eventuella anvisningar måste sedan följas. 4) Ursprunglig funktion får inte ändras och produkten ska användas för avsedd indikation. 5) Produkt tillverkad i neopren bör ej användas mer än 3-4 timmar i sträck. Produkt i annat material än neopren bör ej användas mer än 8 timmar i sträck om ej annat anges av ordinator. 6) Om du är överkänslig mot latex/gummi, och produkten innehåller latex/gummi, rådgör med din ordinator innan du använder produkten (se materialdeklaration ovan). 7) Om du är överkänslig mot värme rekommenderas produkt som inte är tillverkad i det värmande materialet neopren.
-------------	---

**Avser endast Medical-produkter: läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, ortopedingenjör*

Tvätt-

Instruktion	1) Stäng alla kardborrespännen. 2) Tag ut löstagbara skenor. 3) Använd med fördel tvättpåse. 4) Sträckes i vått tillstånd och torka.
-------------	---